

Upute za upotrebu

**Tekućina za oblikovanje
(Dodatak za Dentalna keramika)**



Upute za upotrebu

【Naziv opreme】 Tekućina za oblikovanje

【Model/specifikacija】

Kategorija	Kod	Specifikacija (grama po boci)
Tekućina za miješanje zatamnjujućeg porculana OP	OF	15, 50, 240
Posebna tekućina za tjelesni porculan	CFS	15, 50, 240
Glazurna tekućina	GY	5, 15, 50, 240

【Sastojci】 Formacijska tekućina napravljena od H₂O, C₄H₁₀O₂ i C₅H₁₂O₂.

【Predviđena upotreba】 Tekućina za oblikovanje podijeljena je na posebnu tekućinu za tjelesni porculan, tekućinu za miješanje zatamnjujućeg porculana (OP), i glazurnu tekućinu; miješa se s porculanskim prahom za modeliranje i izradu porculanskih zubi.

【Kliničke Indikacije】 Dodatci koji se koriste za miješanje dentalnog porculanskog praha, prikladni za popravak zubnih oštećenja (karijes, oštećeni zubi itd.), popravak fiksnih mostova za nedostajuće zube, kao i estetske popravke obojenih zubi. Tekućina za oblikovanje sprječava brzo sušenje keramičkih materijala i istovremeno povećava plastičnost tijekom slaganja. Preporučeni omjer miješanja praha i tekućine je sljedeći:

Model	Kategorija porculanskog praha	Kategorija tekućine za oblikovanje	Preporučeni omjer miješanja praha i tekućine
Metalno-ke рамика	Zatamnjujući veznik	Tekućina za zatamnjujući porculan (OF)	1g : 0.67g
	Zatamnjujući porculan OP	Tekućina za zatamnjujući porculan (OF)	1g : 0.43g
	Nevidljivi dentin, dentin, serija poluprozirnih i prozirnih porculana	Tekućina za tjelesni porculan (CFS)	1g : 0.39g
	Glazura, reparaturni i bojeni porculani	Glazurna tekućina (GY)	1g : 0.67g
Cirkonijska keramika	Nevidljivi dentin, dentin, serija poluprozirnih i prozirnih porculana	Tekućina za tjelesni porculan (CFS)	1g : 0.39g
	Glazura, reparaturni i bojeni porculani	Glazurna tekućina (GY)	1g : 0.67g

【Kontraindikacije】 Alergijske reakcije na sastojke u ovom proizvoda.

【Upozorenja i oprezi】

- Samo za dentalnu upotrebu i čuvajte ga čistim.
- U slučaju slučajnog kontakta s očima ili dugotrajnog kontakta s oralnim tkivima i udisanja, odmah isprati s puno vode.

【Upute za upotrebu】 Proizvod se koristi zajedno s dentalnom keramikom.

- Za miješanje zatamnjujućeg porculana koristi se tekućina za zatamnjujući porculan (OF); za zatamnjujuće osnovne porculane i zatamnjujuće veznike.
- Za tjelesni porculan koristi se specijalna tekućina (CFS) za miješanje nevidljivog dentina, dentina, poluprozirne i prozirne porcelane.
- Za miješanje glazura, reparaturnih i bojenih porculana koristi se glazurna tekućina (GY).
- Prah se miješa s posebnom tekućinom za oblikovanje i upotrebljava se prema uputama za rad i parametrima pečenja.

- Izbjegavajte intenzivno miješanje koje može uzrokovati ulazak mjehurića zraka u smjesu. Tijekom i nakon miješanja, vizualno provjerite jednolikost smjese i odsutnost stranih tijela.

【Uvjeti skladištenja】 Proizvod treba skladištiti na odgovarajućoj temperaturi i izbjegavati izlaganje jakom svjetlu. Proizvod čuvajte izvan dohvata djece. Pakiranje treba biti hermetički zatvoreno.

【Uvjeti prijevoza】 Ovaj proizvod nije obuhvaćen regulativom o prijevozu opasnih materijala. Prije prijevoza provjerite jesu li ambalažne kutije neoštećene i čvrsto zapečaćene. Tijekom prijevoza osigurajte da nema curenja, prevrtanja, kondenzacije ili oštećenja. Ne pohranjujte proizvod zajedno s jakim bazama, vodom i slično. Tijekom prijevoza zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, kiše i visokih temperatura.

【Odlaganje】 Ovaj proizvod nije opasan otpad; odlaganje proizvoda ili njegove ambalaže treba obaviti u skladu s nacionalnim ili lokalnim propisima.

【Datum proizvodnje】 Vidi etiketu na proizvodu.

【Rok trajanja】 12 mjeseca.

【Zemlja porijekla】 Proizvedeno u Kini

BAOT Biological Technology Co., Ltd

Unit 1 First Floor, Second Floor and Unit 3 Fourth Floor, No. 12 Building, 106 Qihao Road, Torch Development District Zhongshan Guangdong 528437, China
Tel: +86-760-87893825 Email: baotw@baot.biz



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

SRN: DE-AR-00000001



















Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, The Netherlands

SRN: NL-IM-00000454

【Grafički simboli】

Grafički simbol	Opis simbola	Grafički simbol	Opis simbola
	Krhljiv predmet, pažljivo rukovanje		Temperaturni raspon: - 18 °C ~ 50°C
	Prouči upute za uporabu ili prouči elektroničku verziju uputa		Raspon vlage: 30% ~ 80%
	Održavati suho		Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno
	Upute (vidi upute za uporabu)		Ograničenje slaganja do 5 slojeva
	Datum proizvodnje		Senzibilno na sunčevu svjetlost
	Rok trajanja		Za uporabu samo na recept
	Kod serije		Proizvođač
	Organ za simboličku ocjenu		Ovlašteni zastupnik EU
	Medicinski uređaj, označava da je predmet medicinski uređaj		Uvoznik u Europu