

Instrukcja Użytkowania

Płyny formujące (Akcesoria do Ceramika Stomatologiczna)



Instrukcja użytkowania

【Nazwa urządzenia】 Płyny formujące

【Model/specyfikacja】

Kategoria	Kod	Specyfikacje (mililitr na butelkę)
Płyn do mieszania porcelany OP maskującej	OF	15, 50, 240
Specjalny płyn do porcelany korpusowej	CFS	15, 50, 240
Płyn do glazury	GY	5, 15, 50, 240

【Składniki】 Płyny formujące wykonany przez H_2O , $C_4H_{10}O_2$ oraz $C_5H_{12}O_2$

【Przeznaczenie】 Płyny formujące są podzielone na: specjalny płyn do porcelany korpusowej, płyn do mieszania porcelany OP maskującej, płyn do glazury; mieszane z proszkiem porcelanowym do formowania i produkcji porcelanowych zębów.

【Wskazania kliniczne】 Akcesoria do mieszania proszków porcelanowych, przeznaczone do napraw zębów (próchnica, uszkodzone zęby itp.), napraw mostów stałych na brakujące zęby oraz estetycznych napraw zabarwionych zębów. Płyny formujące zapobiegają szybkiemu wysychaniu materiałów ceramicznych, zwiększając plastyczność podczas układania warstw. Zalecane proporcje mieszania proszku i płynu są następujące:

Model	Kategoria proszku ceramicznego	Kategoria płynu formującego	Zalecana proporcja mieszanki proszku i płynu
Ceramika metaliczna	Agent wiążący z porcelaną złotą	Płyn specjalny do porcelany maskującej (OF)	1g : 0.67g
	Porcelana maskująca OP	Płyn specjalny do porcelany maskującej (OF)	1g : 0.43g
	Nieprzezroczysta dentyna porcelanowa, dentyna porcelanowa, Seria porcelan półprzezroczystych, seria porcelan przejrzystych	Płyn specjalny do porcelany korpusowej (CFS)	1g : 0.39g
	Proszek glazurowy, porcelana naprawcza, porcelana barwiąca	Płyn do glazury (GY)	1g : 0.67g
Ceramika zirkoniowa	Nieprzezroczysta dentyna porcelanowa, dentyna porcelanowa, Seria porcelan półprzezroczystych, seria porcelan przejrzystych	Płyn specjalny do porcelany korpusowej (CFS)	1g : 0.39g
	Proszek glazurowy, porcelana naprawcza, porcelana barwiąca	Płyn do glazury (GY)	1g : 0.67g

【Przeciwwskazania】 Alergiczne reakcje na składniki produktu.

【Środki ostrożności i ostrzeżenia】

- Wyłącznie do użytku dentystycznego i utrzymywać w czystości.
- Nie można włożyć do ust. W przypadku przypadkowego kontaktu z oczami lub długotrwałego kontaktu z tkanką ustną i wdychania, należy natychmiast przemyć dużą ilością wody.

【Instrukcje】 Produkt jest używany razem z ceramiką dentystyczną.

- Użyj płynu do porcelany maskującej (OF) do mieszania agenta wiążącego z porcelaną złotą i podkładową porcelaną maskującą;
- Użyj specjalnego płynu do porcelany korpusowej (CFS) do mieszania nieprzezroczystej dentyny porcelanowej, dentyny porcelanowej i półprzezroczystej porcelany;
- Użyj płynu do glazury (GY) do mieszania proszku glazurowego, porcelany naprawczej i porcelany barwiącej.
- Mieszaj proszek ceramiczny z dedykowanym płynem formującym zgodnie z instrukcjami operacyjnymi i

parametrami wypalania.

- Unikaj intensywnego mieszania, co może spowodować wprowadzenie bąbelków powietrza do mieszanki. W trakcie mieszania i po mieszaniu, dokonaj wizualnego sprawdzenia, aby upewnić się, że mieszanka jest jednolita i nie zawiera żadnych obcych elementów.

【Warunki przechowywania】 Produkt ten powinien być przechowywany w odpowiedniej temperaturze, unikając bezpośredniego światła słonecznego. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte.

【Warunki transportu】 Produkt ten nie podlega regulacjom dotyczącym transportu materiałów niebezpiecznych. Przed transportem sprawdź, czy opakowanie jest nienaruszone i szczelnie zamknięte. Zapewnij, że w trakcie transportu nie będzie przecieków, zapadania się, zamoczenia lub uszkodzeń. Nie przechowuj towaru razem ze związkami silnie zasadowymi, wodą itp. W trakcie transportu zabezpiecz przed działaniem promieni słonecznych, deszczu i wysokich temperatur.

【Utylizacja】 Produkt ten nie jest odpadem niebezpiecznym, utylizacja produktu lub jego opakowania powinna być przeprowadzana zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami.

【Data produkcji】 Informacje znajdują się na etykiecie produktu.

【Okres trwałości】 12 miesięcy.



BAOT Biological Technology Co., Ltd

Unit 1 First Floor, Second Floor and Unit 3 Fourth Floor, No. 12 Building, 106 Qihao Road,
Torch Development District Zhongshan Guangdong 528437, China

Tel: +86-760-87893825 Email: baotw@baot.biz



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

SRN: DE-AR-000000001



Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, The Netherlands

SRN: NL-IM-00000454

【Symbole graficzne】

Symbol	Opis symbolu	Symbol	Opis symbolu
	Kruche, ostrożnie przenieś		Zakres temperatur: od -18 °C do 50 °C
	Sprawdź instrukcję obsługi lub elektroniczną wersję instrukcji obsługi		Zakres wilgotności < 80%
	Utrzymuj w suchości		Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Uwagi (zobacz instrukcję obsługi)		Ograniczenie stosowania do 5 warstw
	Data produkcji		Chronić przed słońcem
	Termin ważności		Tylko na receptę
	Kod partii		Producent
	Instytucja dokonująca oceny zgodności		Wyłączny przedstawiciel w Unii Europejskiej
	Przedmiotem jest urządzenie medyczne, oznaczające, że jest to urządzenie medyczne		Europejski importer